

# WALTHER®

## MEDIZINPRODUKTE

---

### **Bedienungsanleitung für passiven Rauchgasfilter bei chirurgischen, laparoskopischen Eingriffen unter der Verwendung von Trokaren.**

Dieser Rauchgasfilter ist ausschließlich zum operativen Einsatz zu benutzen.

Es ist untersagt diesen Filter in seiner Bauform zu modifizieren.

Die Benutzung des Rauchgasfilters ist dem medizinisch geschulten Fachpersonal vorbehalten.

Eine Resterilisation des Rauchgasfilters ist nicht erlaubt.

Bitte versichern Sie sich von der unbeschädigten Verpackung.

Bitte überprüfen Sie das Ablaufdatum der gesicherten Sterilität.

1. Bitte entnehmen Sie den Rauchgasfilter unter sterilen Bedingungen aus der Verpackung.
2. Schließen Sie bitte den Rauchgasfilter mit dem männlichen Luer-Lock Anschluss an den, im Patienten platzierten Trokar an.
3. Schließen Sie bitte das Quetschventil am Rauchgasfilter komplett.
4. Öffnen Sie bitte das Zwei – Wege Ventil am Trokar.
5. Öffnen Sie nun bitte langsam das Quetschventil.
  - für ständigen leichten Gasfluss während des operativen Eingriffs ( bessere Sicht im Situs )  
leicht geöffnet belassen
  - für den kompletten atmosphärischen Druckausgleich bitte das Ventil ganz öffnen
6. Ist die Funktion des Filters erfüllt, bitte schließen Sie das Ventil am Trokar.
7. Verschließen Sie bitte anschließend das Quetschventil .
8. Lösen Sie bitte die Luer – Lock Verbindung

9. Bitte entsorgen Sie den Filter nach den Richtlinien Ihrer Einrichtung im Umgang mit kontaminierten (Biohazard) Abfällen.

Rauchgase im OP Empfehlung der Berufsgenossenschaft

[https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Medientypen/Fachartikel/chirurgische-Rauchgase-Download.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Medientypen/Fachartikel/chirurgische-Rauchgase-Download.pdf?__blob=publicationFile)